

Controle glucosemeter

Patiëntgegevens

Voorletters en (geboorte)naam *Ruimte voor naamsticker*

Geboortedatum

Huisarts/specialist

Informatie voor de patiënt

Om te kijken of uw glucosemeter goed werkt, wordt deze vergeleken met de laboratoriummethode. Dit gaat als volgt:

- U komt naar een Saltro locatie voor een bloedafname voor de periodieke diabetescontrole en neemt het aanvraagformulier voor het laboratorium **en** dit formulier mee.
- U neemt uw eigen glucosemeter mee die u gebruikt voor het vingerprikken.
- Een medewerker van Saltro neemt bloed bij u af.
- Direct na deze bloedafname meet u de bloedsuiker met een vingerprik op uw eigen glucosemeter (geen sensorwaarde gebruiken).
- U noteert de uitslag van de meting van uw eigen meter op dit formulier in het volgende vak en geeft het ingevulde formulier af aan de laboratoriummedewerker.

In te vullen door de patiënt

Datum meting:

De uitslag van de bloedsuiker gemeten op uw eigen meter is mmol/L.

Kruis aan indien van toepassing:

- De meting is correct uitgevoerd
- De houdbaarheidsdatum van mijn strips is verlopen

Informatie voor Saltro medewerker

Neem bij deze patiënt bloed af zoals op het Saltro aanvraagformulier is aangegeven. Doe het aanvraagformulier, dit ingevulde formulier en de buis (of buizen) in een apart zakje en vermeld hierop t.a.v. de AAP.

Plak hier een blanco barcodesticker:

*Blanco barcodesticker met
labnummer*

In te vullen door medewerker preanalyse

Verwerk het resultaat van de bloedsuiker gemeten op de eigen meter van de patiënt is Labosys onder bovenstaand labnummer en testcode PGPO.

Uitgevoerd door:

Verwerkt door: