

CONTROLE GLUCOSEMETER

<u>Gegevens patiënt:</u>	ruimte voor naamsticker
Voorletters + (geboorte)naam:.....	
Geboortedatum:.....	
Huisarts/Specialist:.....	

<u>Informatie voor de patiënt:</u>
Om te kijken of uw glucosemeter goed werkt, wordt deze vergeleken met de laboratoriummethode. Dit gaat als volgt:
<ul style="list-style-type: none">• U komt naar een Saltro locatie voor een bloedafname voor de periodieke diabetes- controle en neemt het aanvraagformulier voor het laboratorium en dit formulier mee.• Ook neemt u uw eigen glucosemeter mee.• Er wordt door de medewerker van Saltro bloed bij u afgenomen.• Direct na deze bloedafname meet u zelf uw bloedsuiker op uw eigen glucosemeter.
U noteert de uitslag van de meting van uw eigen meter op dit formulier in het volgende vak en geeft het ingevulde formulier af aan de medewerker van Saltro.

<u>In te vullen door de patiënt:</u>
Datum meting:.....
De uitslag van de bloedsuiker gemeten op de eigen glucosemeter ismmol/l.
Kruis aan indien van toepassing:
<input type="checkbox"/> De meting is correct uitgevoerd
<input type="checkbox"/> De houdbaarheid van mijn strips is verlopen
<input type="checkbox"/> De code staat niet goed in mijn glucosemeter

<u>Informatie voor de Saltro medewerker:</u>
<ul style="list-style-type: none">• Neem bij deze patiënt bloed af zoals op het Saltro aanvraagformulier is aangegeven. Doe het aanvraagformulier, dit ingevulde formulier en de buis of buizen in een apart zakje en vermeld hierop t.a.v. de AAP.• Plak hier een blanco barcodesticker:
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;">Blanco barcodesticker met labnummer</div>

<u>In te vullen door medewerker preanalyse:</u>
Verwerk het resultaat van de bloedsuiker gemeten op de eigen meter van de patiënt is Labosys onder bovenstaand labnummer en testcode PGPO.
Uitgevoerd door:..... Gecontroleerd door:.....