

Controle glucosemeter



Patiëntgegevens

Patiëntnummer

Voorletters en naam

Meisjesnaam

Geboortedatum

Huisarts/specialist

Informatie voor de patiënt

Om te kijken of uw glucosemeter goed werkt, wordt deze vergeleken met de laboratoriummethode. Dit gaat als volgt:

- U komt naar het ziekenhuis of een prikpunt voor een bloedafname voor de periodieke diabetescontrole en neemt het aanvraagformulier voor het laboratorium **en** dit formulier mee.
- U neemt uw eigen glucosemeter mee die u gebruikt voor het vingerprikken
- Een laboratoriummedewerker neemt bloed bij u af.
- Direct na deze bloedafname meet u de bloedsuiker met een vingerprik op uw eigen glucosemeter (geen sensorwaarde gebruiken)
- U noteert de uitslag van de meting van uw eigen meter op dit formulier in het volgende vak en geeft het ingevulde formulier af aan de laboratoriummedewerker.

In te vullen door de patiënt

Datum meting: Merk meter: Type meter:.....

De uitslag van de bloedsuiker gemeten op uw eigen meter is mmol/L.

Kruis aan indien van toepassing:

- De houdbaarheidsdatum van mijn strips is verlopen

In te vullen door de laboratoriummedewerker

Noteer het labnummer waaronder de bijbehorende bloedafname is ingelezen:

Stuur het formulier naar, of geeft het af bij, balie CDL.

In te vullen door de administratief medewerker

Verwerk de resultaten m.b.v. werklijst 78.

Uitgevoerd door:

Verwerkt door: